

Контрольная сыворотка цистатина С Уровень 2 (TruLab Cystatin C Level 2)

Информация для заказа

Кат. № Фсовка
5 9880 99 10 046 1×1 мл Уровень 2

Описание

TruLab Cystatin C – стабильный контроль на водной основе, содержащий рекомбинантный Цистатин С. Концентрация цистатина С в контроле TruLab Cystatin C (уровень 2) находится в патологическом диапазоне.

Хранение

Флаконы контроля TruLab Cystatin C как открытые, так и закрытые, следует хранить при температуре 2–8 °С.

Стабильность

В закрытом флаконе: до конца указанного срока годности.

В открытом флаконе: не менее 12 недель. Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с контролем.

Предупреждения и предостережения

1. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

2. TruLab Cystatin C содержит биологический материал. Обращайтесь с контрольными сыворотками, как с потенциально инфицированными образцами пациентов.

3. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности и примите все необходимые меры предосторожности при работе с калибраторами и контролями.

4. Только для профессионального использования!

Подготовка

Контрольная сыворотка TruLab Cystatin C поставляется в жидком виде и готова к применению.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к данному набору.

Средние значения

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик.

Указанные ниже в таблице средние значения контроля действительны только для данного лота.

Литература

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany

TruLab Cystatin C	Номер лота	Срок годности	Номинальное значение	Допуск
уровень 2	21972	2017-07	3,36 мг/л	2,86-3,86 мг/л