

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Бкрб				
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.				
Тест	Бкрб		R1	200
№	*		R2	0
Полн.назв	Бикарбонаты		Объем проб	2
№ станд.			R1 холост	-
Тип реакц	Кон.точ		Смеш.хол.реаг	-
Перв.крив	412		Диап.линейн.	4 - 50
Втор.крив	505		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен		Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 38		Козфф.	
Вр.инкуб.			☐ Проверка прозоны	
Единица	mmol/L		q1	q2 q3 q4
Точн.	0.1		ПК	Пог
Доб. Удалить ОК Отмена				

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедиться, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос		
Бкрб						
	Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
	Nº	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
	1	Муж	Сыворот		22	29
	2	Жен	Сыворот		22	29
Пол		Проба	Возраст		Низкий	Высок
			-			
Доб.		Удалить		ОК		Отмена

Доб.	Удалить	ОК	Отмена
------	---------	----	--------

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'Бкарб' (Bicarbonate) parameter setup window. It has a top menu bar with 'Тест', 'Профиль', 'Вычислен.', 'Внесистемные', and 'Перенос'. Below this is a sub-menu bar with 'Параметры', 'Номинал', 'Калибр.', and 'Контр.кач.'. The 'Калибр.' tab is active. On the left, under 'Бкарб', there are several input fields: 'Прав.' (set to 'Двухточ.линейн'), 'Чувствительн.', 'Повторы' (set to 2), 'Интервал(дн)', 'Предел разл.', 'SD', 'Холост. ответ', 'Предел ошибки', and 'Определение коэф.' (set to 0). On the right, the 'Калибраторы' section contains a table with two columns: 'Назв' and 'Конц.'. The table lists 'Вода' with a concentration of 0.0 and 'TruCalU' with a concentration marked with red asterisks (**). Below the table are fields for 'Назв' and 'Конц.', a checkbox for 'Разв.кал', and a 'Подробнее' button. At the bottom, there is a 'Выбор правила калибровки' section with buttons 'Доб.', 'Удалить', 'ОК', and 'Отмена'.

Назв	Конц.
Вода	0.0
TruCalU	**

******-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.