

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Миогл				
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.				
Тест	Миогл		R1	150
№	*		R2	50
Полн.назв	Миоглобин		Объем проб	5
№ станд.			R1 холост	-
Тип реакц	Фикс.время		Смеш.хол.реак	-
Перв.крив	570		Диап.линейн.	5 - 600
Втор.крив			Предел линейн.	
Направл.	Увеличен		Предел субстр.	
Вр.реакц	1 - 19		Козэф.	
Вр.инкуб.	16		☐ Проверка прозоны	
Единица	ug/L		q1	q2 q3 q4
Точн.	0.1		ПК	Пог
Доб. Удалить ОК Отмена				


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

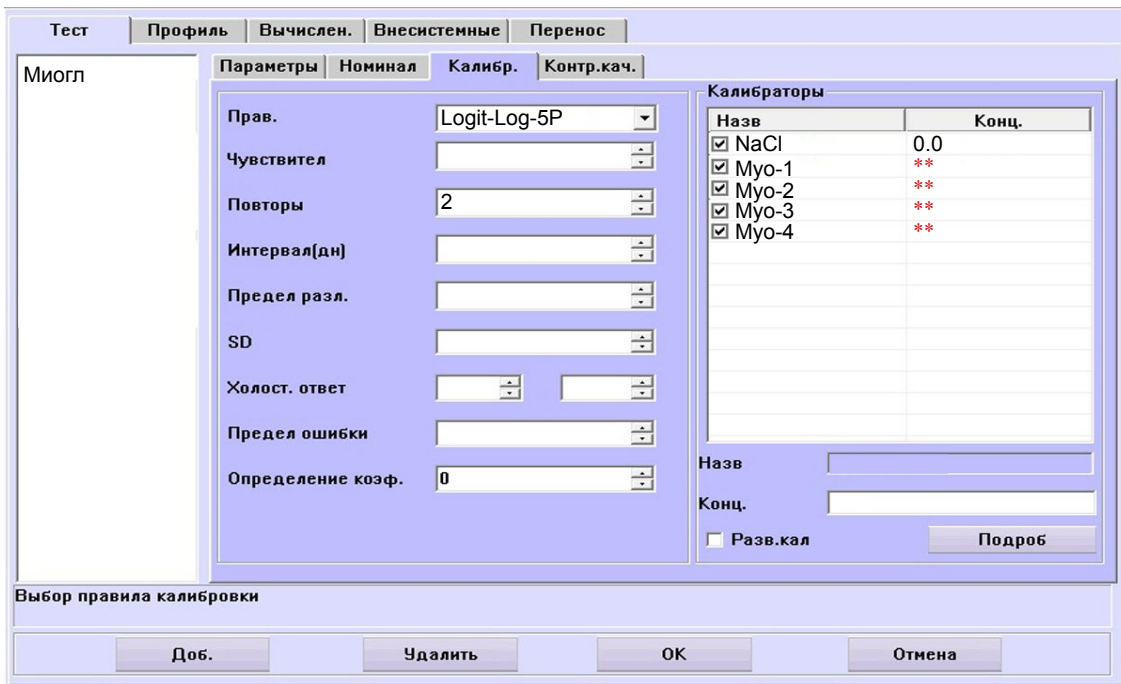

The screenshot shows the 'Миогл' (Myoglobin) test configuration window. The 'Калибр.' (Calibration) tab is active. On the left, under 'Парам.' (Parameters), various settings are listed: 'Прав.' (Method) is set to 'Logit-Log-5P', 'Чувствител.' (Sensitivity) is empty, 'Повторы' (Repeats) is 2, 'Интервал(дн)' (Interval in days) is empty, 'Предел разл.' (Resolution limit) is empty, 'SD' is empty, 'Холост. ответ' (Blank response) has two empty input fields, 'Предел ошибки' (Error limit) is empty, and 'Определение коэф.' (Coefficient determination) is 0. On the right, the 'Калибраторы' (Calibrators) table is shown with columns 'Назв.' (Name) and 'Конц.' (Concentration). The table contains four entries: NaCl (0.0), Myo-1 (**), Myo-2 (**), and Myo-3 (**). Below the table, there are fields for 'Назв.' and 'Конц.' of a new calibrator, a checkbox for 'Разв. кал' (Develop calibrator), and a 'Подробнее' (More details) button. At the bottom, there are buttons for 'Доб.' (Add), 'Удалить' (Delete), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Назв.	Конц.
NaCl	0.0
Myo-1	**
Myo-2	**
Myo-3	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр. кач.» соответственно.