

Thiocyanate (тиоцианатный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос																																																				
Хлор	Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.	<table border="1"> <tr> <td>Тест</td> <td>Хлор</td> <td>R1</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>№</td> <td>*</td> <td>R2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Полн.назв</td> <td>Хлориды</td> <td>Объем проб</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>№ станд.</td> <td></td> <td>R1 холост</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тип реакц</td> <td>Кон.точ</td> <td>Смеш.хол.реак</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перв.крив</td> <td>450</td> <td>Диап.линейн.</td> <td>1.0 - 130.0</td> </tr> <tr> <td>Втор.крив</td> <td></td> <td>Предел линейн.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Направл.</td> <td>Увеличен</td> <td>Предел субстр.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вр.реакц</td> <td>-1 - 19</td> <td>Козфф.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вр.инкуб.</td> <td></td> <td>☐ Проверка прозоны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Единица</td> <td>mmol/L</td> <td>q1</td> <td>q2</td> </tr> <tr> <td>Точн.</td> <td>Целое</td> <td>q3</td> <td>q4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ПК</td> <td>Пог</td> </tr> </table>			Тест	Хлор	R1	200	№	*	R2	0	Полн.назв	Хлориды	Объем проб	2	№ станд.		R1 холост		Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реак		Перв.крив	450	Диап.линейн.	1.0 - 130.0	Втор.крив		Предел линейн.		Направл.	Увеличен	Предел субстр.		Вр.реакц	-1 - 19	Козфф.		Вр.инкуб.		☐ Проверка прозоны		Единица	mmol/L	q1	q2	Точн.	Целое	q3	q4			ПК	Пог
Тест	Хлор	R1	200																																																					
№	*	R2	0																																																					
Полн.назв	Хлориды	Объем проб	2																																																					
№ станд.		R1 холост																																																						
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реак																																																						
Перв.крив	450	Диап.линейн.	1.0 - 130.0																																																					
Втор.крив		Предел линейн.																																																						
Направл.	Увеличен	Предел субстр.																																																						
Вр.реакц	-1 - 19	Козфф.																																																						
Вр.инкуб.		☐ Проверка прозоны																																																						
Единица	mmol/L	q1	q2																																																					
Точн.	Целое	q3	q4																																																					
		ПК	Пог																																																					
Доб. Удалить ОК Отмена																																																								

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест **Профиль** **Вычислен.** **Внесистемные** **Перенос**

Хлор

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		95.0	105.0
2	Жен	Сыворот		95.0	105.0

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
▼	▼	▼		

Доб.
Удалить
ОК
Отмена

Хлориды

Thiocyanate (тиоцианатный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'Хлор' (Chloride) parameter configuration window. It has tabs for 'Тест', 'Профиль', 'Вычислен.', 'Внесистемные', and 'Перенос'. The 'Калибр.' (Calibration) tab is active, showing a list of calibration parameters on the left and a table of calibrators on the right.

Калибры

Назв	Конц.
☒ Вода	0.0
☒ TruCalU	**

Назв:
Конц.:
☐ Разв.кал

Параметры

Прав.: Двухточ.линейн
Чувствител.:
Повторы: 2
Интервал(дн):
Предел разл.:
SD:
Холост. ответ:
Предел ошибки:
Определение коэф.: 0

Выбор правила калибровки

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.