

Мочевая кислота

TOOS (метод с толуидином (TOOS))

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC MK

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста:

Тест в работе:

Полное имя:

Сетевое имя:

Предел теста: Мин Макс мкмоль/л

Начальн. абс: А

Предел разв-я: мкмоль/л

Вторич раз-е 1 +

Границы:

Кол-во знаков:

Подтверждение:

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	155	357	мкмоль/л	ДА
Муж	208	428	мкмоль/л	ДА

Разведение 1 +

Тип образца: ☒ Сыворотка ☒ Плазма ☐ Моча ☐ СМЖ ☐ Другие

Дата коррекции:

Гран.норм Мин Макс В работе

Коррекция фактора:

Коррекция смещ.: мкмоль/л

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC MK

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон:

Избыток антиг.:

Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив	Образец	Инкубация	Кон.точка	Реактив	Инкубация	Кон.точка
Реактив: UAD_1 Объем (мкл): 100	Объем (мкл): 2	Время (сек.): 180	Фон	Реактив: UAD_2 Объем (мкл): 25	Время (сек.): 300	Длина волны (нм): 540 nm Дополн. длина: 700 nm
Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 20	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Ответ мин. (А): * Ответ макс. (А): 0.8	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 10		Тип измерения: Норм.
Моющий раствор: [Нет]	Разбавл-е с: Вода Моющий раствор: [Нет]			Моющий раствор: [Нет]		

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

Мочевая кислота

TOOS (метод с толуидином (TOOS))

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC MK

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Линейный	Фактор		Смещение	
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)	
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)	
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество	
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный	
Калибраторы		Стандарт	Конц.	коэф. разв.	Код смещения std
Концентрация		Water	0	0.0	
Коэф. разв. 1 +		TruCalU	**	0.0	

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

** - вводится из паспорта к калибратору

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно