

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC **Обмоч**

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста: **Фотометрический**

Тест в работе: **ДА**

Полное имя: **Общ.бел.моч**

Сетевое имя: *****

Границы: **мг/л**

Кол-во знаков: **0**

Подтверждение: **Автомат.**

Разведение 1 +: **0**

Тип образца:
☐ Сыворотка ☐ Плазма ☒ Моча
☐ СМЖ ☐ Другие

Дата коррекции

Предель тест: **0** **6000** **мг/л**

Начальн. абс: **0** **3.000** **А**

Предель раз-я: ***** **3000** **мг/л**

Вторич раз-е 1 +: **0.0** **1**

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	24	141	мг/л	ДА
Муж	24	141	мг/л	ДА

Гран.норм: **Мин** **Макс** **В работе**

Коррекция фактора: **1**

Коррекция смещ.: **0** **мг/л** **Далее >>**

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений рассчитывается для мочи с учетом её суточного объема.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC **Обмоч**

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон: **Да**

Избыток антиг.: **НЕТ**

Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив: **ТРuD**

Объем (мкл): **100**

Диспенсир. с: **Экстра**

Объем (мкл): **20**

Моющий раствор: **[Нет]**

Фон

Кон.точка

Образец

Объем (мкл): **2**

Диспенсир. с: **Экстра**

Объем (мкл): **8**

Разбавл-е с: **Вода**

Моющий раствор: **[Нет]**

Инкубация

Время (сек.): **300**

Кон.точка

Длина волны (нм): **600 nm**

Дополн. длина: **Нет**

Тип измерения: **Норм.**

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC ОБмоч

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Линейный	Фактор		Смещение	
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)	
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)	
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество	
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный	
Калибраторы		Стандарт	Конц.	коэф. разв.	Код смещения std
Концентрация		Water	0	0.0	
Коэф. разв. 1 +		CITPu	**		

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

******-вводится из паспорта к калибратору

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.