



# Кальций

Arsenaso III (метод с Арсеназо III)

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Кальций

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

| Назв  | Конц. |
|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Вода    | 0.0   |
| <input checked="" type="checkbox"/> TruCalU | **    |

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить OK Отмена

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.