

Аполипопротеин В (Аpo-B)

иммунотурбидиметрический



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: Apo-B	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Apo-B	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: г/л	Знаки п/запятой	: 1		
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: ----		
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5p-logit-log		
Нач. M1	: 22	Кон. M1	: 24		
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2	: 62		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 2.5		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			
				★ Реагент R1 : ApoB1D	
				★ Реагент R2 : ApoB2D	
				[Задайте он-лайн калибровку]	
				[DOWNLOAD TEST]	
				[UPLOAD TEST]	
				[УСТАН. АВТОПОВТОР]	
				[КОПИР. ТЕСТ]	
				[ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)]	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: Apo-B				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб					
★ Норм.	: 2	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 2	µl	Проп. развед.	: 4	X
★ Объем стандарта	: 2	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 200	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 40	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб					
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					
				[КОПИР. ОБЪЕМЫ]	
				[ПРОСМ. ОБЪЕМОВ]	

Аполиipopротейн В (Аpo-B) иммунотурбидиметрический

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : Apo-B

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : Apo-B

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !