

Аполипопротеин А1

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200(new)

Тест	АпоА1	R1	250
№	*	R2	50
Полн.назв	АпоА1	Объем проб	2
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реак	
Перв.крив	578	Диап.линейн.	0.2 - 250.0
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 19	Коефф.	
Вр.инкуб.	12	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	mg/dL	q1	q2
Точн.	Целое	q3	q4
		ПК	Пог


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		110	170
2	Жен	Сыворот		120	190

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200(new)

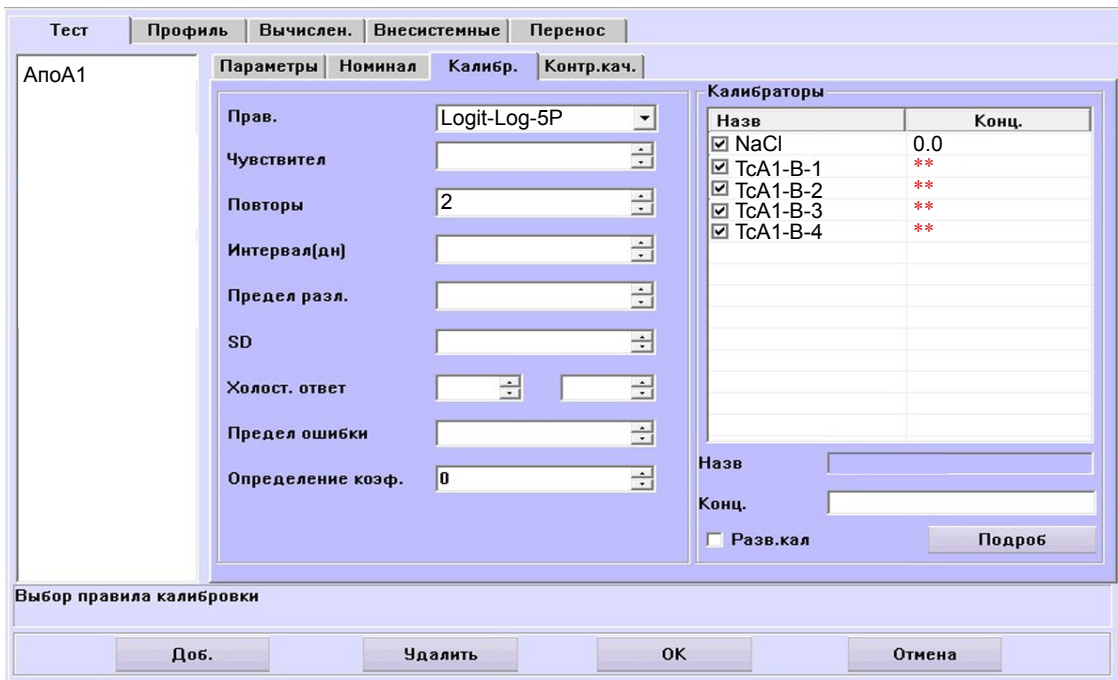

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

АпоА1

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-4	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.