

Pediatric Control

Контрольная сыворотка специфических белков в моче

Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азида натрия.

Упаковка

1 × 1 мл Кат. №: MPP/CON-001
Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °С. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции контрольной сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °С.

Не замораживать!

Установленные значения

Белок	Лот	Срок годности	Номинальное значение, мг/дл*	Допустимый диапазон, мг/дл
α2-Макроглобулин	AL03233	2021-07	11.3	9.6 – 13.0
Трансферрин			12.0	10.2 – 13.8
IgA			9.1	7.7 – 10.4
IgG			45.3	38.5 – 52.1
IgM			6.0	5.1 – 6.9
Лёгкая каппа-цепь**			11.9	10.1 – 13.7
Лёгкая ламбда-цепь**			6.2	5.3 – 7.2

* Значения по Референсному Препарату для белков человеческой сыворотки RPPHS ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Siemens.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)