

Original form Persijn/v.d. Silk 1976 (метод Зейца-Персиджина)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос						
ГГТ	Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.									
	Тест	ГГТ		R1	160					
	№	*		R2	40					
	Полн.назв	ГГТ		Объем проб	16					
	№ станд.			R1 холост	-					
	Тип реакц	Кинетич		Смеш.хол.реак	-					
	Перв.крив	412		Диап.линейн.	2 - 1200					
	Втор.крив	700		Предел линейн.						
	Направл.	Увеличен		Предел субстр.						
	Вр.реакц	4 - 14		Козфф.						
Вр.инкуб.	12		☐ Проверка прозоны							
Единица	U/L		q1		q2		q3		q4	
Точн.	0.1		ПК			Пог				
Доб. Удалить ОК Отмена										

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)

Original form Persijn/v.d. Silk 1976 (метод Зейца-Персиджина)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'ГГТ' (GGT) configuration window. It has a top menu bar with 'Тест', 'Профиль', 'Вычислен.', 'Внесистемные', and 'Перенос'. Below this is a sub-menu bar with 'Параметры', 'Номинал', 'Калибр.', and 'Контр.кач.'. The 'Параметры' tab is active, showing various settings: 'Прав.' (Dvухточ.линейн), 'Чувствитель' (empty), 'Повторы' (2), 'Интервал(дн)' (empty), 'Предел разл.' (empty), 'SD' (empty), 'Холост. ответ' (empty), 'Предел ошибки' (empty), and 'Определение коэф.' (0). To the right is a 'Калибраторы' table with columns 'Назв' and 'Конц.'. It lists 'Вода' (0.0) and 'TruCalU' (**). Below the table are fields for 'Назв' and 'Конц.', a 'Разв.кал' checkbox, and a 'Подробнее' button. At the bottom, there is a 'Выбор правила калибровки' section with 'Доб.', 'Удалить', 'ОК', and 'Отмена' buttons.

Назв	Конц.
Вода	0.0
TruCalU	**

******-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.