

Калибратор микроальбумина (5 уровней) (Microalbumin Standard Set)

Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном определении микроальбумина в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Калибратор микроальбумина представляют собой человеческую сыворотку, к которой добавлен очищенный микроальбумин.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

Жидкие калибраторы микроальбумина (5 концентраций)

5 флаконов × 1 мл

Кат. №: MAL/STS-5X1

**ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ
ЛОТ AL05007 СРОК ГОДНОСТИ ДО 2023-09****Информация для заказа:**

Артикул	Фасовка
MAL/STS-5X1	5 × 1 мл

Готов к использованию.

Состав

Калибратор микроальбумина представляет собой разведённую фосфат-буферизованным физиологическим раствором дефибрированную жидкую стабилизированную человеческую плазму, профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °С. Срок годности указан на ярлыке. После вскрытия флакона калибратор должен быть использован в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °С. Не замораживать!

Установленные значения

Лот	Срок годности
AL05007	2023-09

Предупреждения и меры предосторожности

1. Только для диагностики *in vitro*.
2. Вся донорская кровь, использованная для изготовления калибраторов и контрольных сывороток, была протестирована на антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, а также поверхностный антиген вируса гепатита В и антитела к вирусу гепатита С утверждёнными FDA методами и показала отрицательные результаты.
3. Тем не менее при работе с человеческими образцами следует обращаться с должной осторожностью в соответствии с рекомендованными процедурами для биологически опасных материалов, поскольку полное отсутствие инфекционных агентов не может быть исключено.
4. Реагент содержит азид натрия, необходимо обращаться с осторожностью. Не глотать и не допускать контакта с кожей или слизистыми оболочками! Азид натрия может образовывать взрывоопасные азиды при контакте с тяжёлыми металлами, такими как медь или свинец.

Белок	Калибратор 1 мг/дл*	Калибратор 2 мг/дл*	Калибратор 3 мг/дл*	Калибратор 4 мг/дл*	Калибратор 5 мг/дл*
Микроальбумин	19	54	107	206	407

* Значения для Микроальбумина по референсному препарату ERM-DA470k/IFCC.

Производитель

"Аптек Diagnostix nv", Бельгия, Aptec Diagnostics nv, Industriepark-West 42C, Sint-Niklaas, 9100, Belgium