

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос		
аГБДГ	Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.		
	Тест	аГБДГ		R1 200		
	№	*		R2 50		
	Полн.назв	аГБДГ		Объем проб 2		
	№ станд.			R1 холост		
	Тип реакц	Кинетич		Смеш.хол.реаг		
	Перв.крив	340		Диап.линейн. 3 1200		
	Втор.крив	412		Предел линейн.		
	Направл.	Уменьшен		Предел субстр.		
	Вр.реакц	4 14		Коэфф.		
Вр.инкуб.	12		☐ Проверка прозоны			
Единица	U/L		q1	q2	q3	q4
Точн.	Целое		ПК	Пог		
Доб. Удалить OK Отмена						

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'Калибр.' (Calibration) tab of the software interface. The left sidebar lists 'аГБДГ'. The main area contains several input fields for calibration parameters:

- Прав. (Method): Двухточ.линейн (Two-point linear)
- Чувствител (Sensitivity): [empty]
- Повторы (Repeats): 2
- Интервал(дн) (Interval in days): [empty]
- Предел разл. (Difference limit): [empty]
- SD: [empty]
- Холост. ответ (Blank response): [empty]
- Предел ошибки (Error limit): [empty]
- Определение коэф. (Coefficient determination): 0

On the right, the 'Калибраторы' (Calibrators) table is shown:

Назв	Конц.
☒ Вода	0.0
☒ TruCalU	**

Below the table, there are fields for 'Назв' (Name) and 'Конц.' (Concentration), a checkbox for 'Разв.кал' (Develop calibration), and a 'Подробнее' (More details) button.

At the bottom, there are buttons for 'Доб.' (Add), 'Удалить' (Delete), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.