

| Тест                                                                                                       | Профиль              | Вычислен. | Внесистемные                              | Перенос                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холес                                                                                                      |                      |           |                                           |                                                                                              |
| <div> <div> <div>Параметры</div> <div>Номинал</div> <div>Калибр.</div> <div>Контр.кач.</div> </div> </div> |                      |           |                                           |                                                                                              |
| Тест                                                                                                       | Холес                |           | R1                                        | 200                                                                                          |
| №                                                                                                          | *                    |           | R2                                        | 0                                                                                            |
| Полн.назв                                                                                                  | Холестерин           |           | Объем проб                                | 2                                                                                            |
| № станд.                                                                                                   |                      |           | R1 холост                                 | <input type="text"/> - <input type="text"/>                                                  |
| Тип реакц                                                                                                  | Кон.точ              |           | Смеш.хол.реак                             | <input type="text"/> - <input type="text"/>                                                  |
| Перв.крив                                                                                                  | 505                  |           | Диап.линейн.                              | 0.08 - 19.40                                                                                 |
| Втор.крив                                                                                                  | 700                  |           | Предел линейн.                            | <input type="text"/>                                                                         |
| Направл.                                                                                                   | Увеличен             |           | Предел субстр.                            | <input type="text"/>                                                                         |
| Вр.реакц                                                                                                   | -1 - 38              |           | Козфф.                                    | <input type="text"/>                                                                         |
| Вр.инкуб.                                                                                                  | <input type="text"/> |           | <input type="checkbox"/> Проверка прозоны |                                                                                              |
| Единица                                                                                                    | mmol/L               |           | q1                                        | <input type="text"/> q2 <input type="text"/> q3 <input type="text"/> q4 <input type="text"/> |
| Точн.                                                                                                      | 0.01                 |           | ПК                                        | <input type="text"/> Пог <input type="text"/>                                                |
| <div> <div>Доб.</div> <div>Удалить</div> <div>ОК</div> <div>Отмена</div> </div>                            |                      |           |                                           |                                                                                              |

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

[illegible]

# Холестерин

GHOD-PAP (холестериноксидасный метод)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

**\*\***-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.