

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: aАмил	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: a-Амилаза	Он-лайн калибровк:	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: Ед/л	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>		
Основная дл. волны	: 415	Вспомогат.	: 546		
Тип метода	: Rate-A	Тип калибровки	: Linear		
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0		
★ Нач. M2	: 32	★ Кон. M2	: 48		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 3	Технич. максимум	: 2000		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: aАмил				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 3.2	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 6.4	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 3.2	µl	Проп. развед.	: 9	X
★ Объем стандарта	: 3.2	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 160	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 40	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб					
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : **αАмил**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 0	100
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : **αАмил**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 0	100
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно