

Microalbumin Control
Контроль микроальбумина

Лот AL03368

Назначение

Точная контрольная сыворотка для количественного определения микроальбумина в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Контрольная сыворотка представляет собой дефибринированную стабилизированную жидкую человеческую плазму, профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм и разведённую фосфат-буферизованным физиологическим раствором.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

1 × 1 мл

Кат. №:

MAL/CON-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °С. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона контрольная сыворотка должна быть использована в течение 6 недель.

После отбора порции пробы флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °С.

Не замораживать!

Установленные значения

№ Лота	Годен до:	Номинальное значение, мг/л	Допустимый диапазон, мг/л
AL03368	2021 - 09	207 мг/л	176- 238 мг/л

Значения контрольного материала основаны на ERM-DA470k/IFCC.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)