

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E (монореагент)

Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.
Прав.		Двухточ.линейн	
Чувствител			
Повторы	2		
Интервал(дн)			
Предел разл.			
SD			
Холост. ответ			
Предел ошибки			
Определение коэф.	0		

Калибраторы	Назв.	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/>	Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**

Назв.

Конц.

Разв.кал

Выбор правила калибровки

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.