

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Альбум	Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.
	Тест	Альбум		R1 200
	№	*		R2 0
	Полн.назв	Альбумин		Объем проб 2
	№ станд.			R1 холост
	Тип реакц	Кон.точ		Смеш.хол.реаг
	Перв.крив	546		Диап.линейн. 2 60
	Втор.крив	700		Предел линейн.
	Направл.	Увеличен		Предел субстр.
	Вр.реакц	-1 38		Коэфф.
Вр.инкуб.			☐ Проверка прозоны	
Единица	g/L		q1 q2 q3 q4	
Точн.	0.1		ПК Пор	
Доб. Удалить OK Отмена				

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест Профиль Вычислен. Внесистемные Перенос

Альбум

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствитель

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
☒ Вода	0.0
☒ TruCalU	**

Назв

Конц.

☐ Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить OK Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.