


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

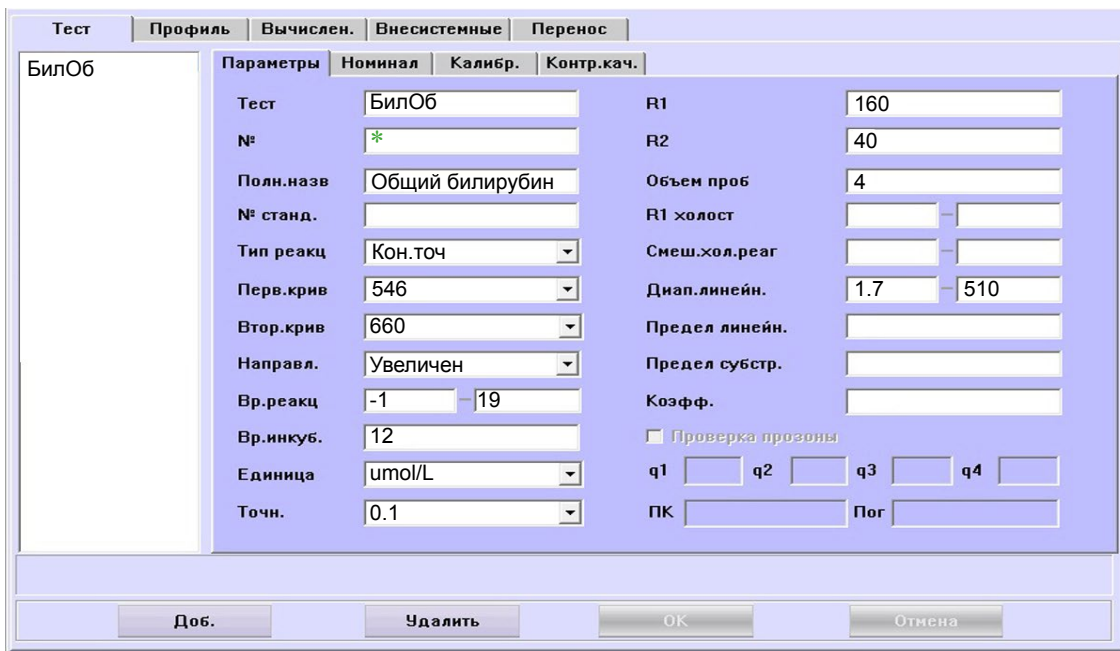

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

БилОб

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.


Тест	БилОб	R1	160
№	*	R2	40
Полн.назв	Общий билирубин	Объем проб	4
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реак	
Перв.крив	546	Диап.линейн.	1.7 - 510
Втор.крив	660	Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 19	Коефф.	
Вр.инкуб.	12	☐ Проверка прозоны	
Единица	umol/L	q1	q2
Точн.	0.1	q3	q4
		ПК	Пог

Доб. Удалить OK Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

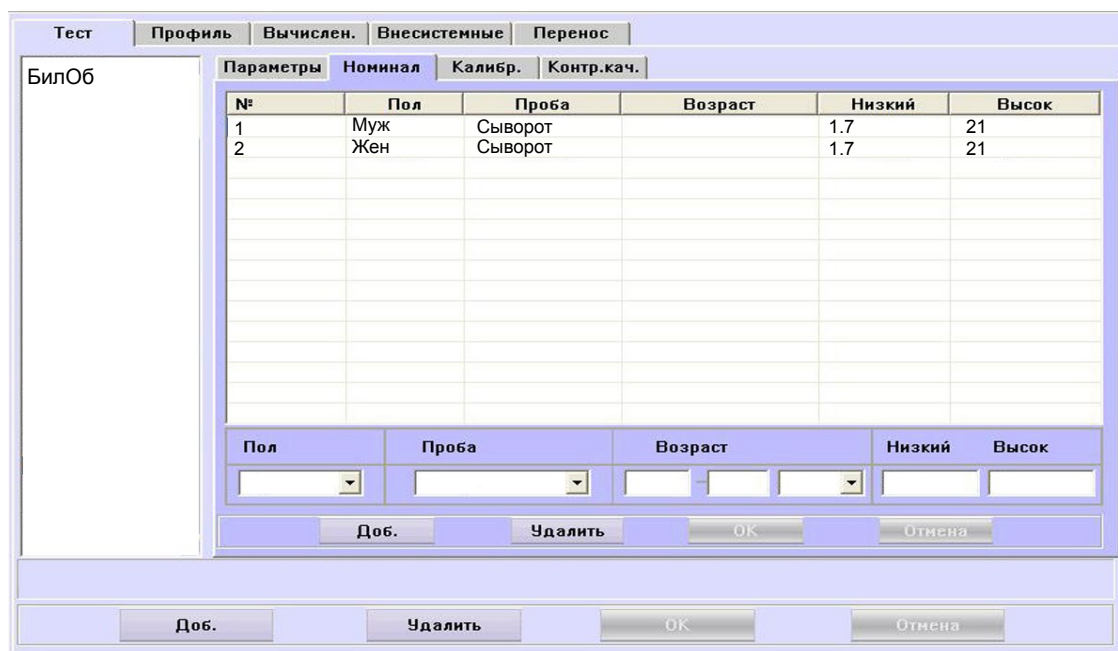

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

БилОб

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		1.7	21
2	Жен	Сыворот		1.7	21

Пол Проба Возраст Низкий Высок

Доб. Удалить OK Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'Калибр.' (Calibration) tab of the software. On the left, under 'Парам.' (Parameters), there are settings for 'Прав.' (Method) set to 'Двухточ.линейн' (Two-point linear), 'Чувствител.' (Sensitivity), 'Повторы' (Repeats) set to 2, 'Интервал(дн)' (Interval in days), 'Предел разл.' (Resolution limit), 'SD', 'Холост. ответ' (Blank response), 'Предел ошибки' (Error limit), and 'Определение коэф.' (Coefficient determination) set to 0. On the right, the 'Калибраторы' (Calibrators) table lists 'Вода' (Water) with a concentration of 0.0 and 'TruCalU' with a concentration marked with red asterisks (**). Below the table, there are fields for 'Назв.' (Name) and 'Конц.' (Concentration), a checkbox for 'Разв.кал' (Develop calibration), and a 'Подробнее' (More details) button. At the bottom, there are buttons for 'Доб.' (Add), 'Удалить' (Delete), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Назв	Конц.
☒ Вода	0.0
☒ TruCalU	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.