

PAP (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
СвЖК				
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.				
Тест	СвЖК		R1	160
№	*		R2	40
Полн.назв	Св. жирные кислоты		Объем проб	3.2
№ станд.			R1 холост	-
Тип реакц	Кон.точ v		Смеш.хол.реак	-
Перв.крив	546 v		Диап.линейн.	0.01 - 3.00
Втор.крив	605 v		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен v		Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 19		Козфф.	
Вр.инкуб.	12		☐ Проверка прозоны	
Единица	mmol/L v		q1	q2 q3 q4
Точн.	0.01 v		ПК	Погр
Доб. Удалить ОК Отмена				

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест

Профиль

Вычислен.

Внесистемные

Перенос

СвЖК

Параметры

Номинал

Калибр.

Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.1	0.60
2	Жен	Сыворот		0.1	0.45

Пол

Проба

Возраст

Низкий

Высок

Доб.

Удалить

ОК

Отмена

Доб.

Удалить

ОК

Отмена

Свободные жирные кислоты (NEFA)

PAP (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

СвЖК

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствитель

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
☒ NaCl	0.0
☒ TruCalL	**

Назв

Конц.

☐ Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.