

# Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)



Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab (монореагент)

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC ЩФ1

Образцы Данные Реактивы Меню

Тип теста: Фотометрический

Тест в работе: ДА

Полное имя: Щел.фосфатаза

Сетевое имя: \*

Предел теста: Мин 0, Макс 8000, Ед/л

Начальн. абс: 0, 3.000, А

Предел разв-я: +, 800, Ед/л

Вторич раз-е 1 +: 0.0, 9

Границы: Ед/л

Кол-во знаков: 0

Подтверждение: Автомат.

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	0	258	Ед/л	ДА
Муж	0	258	Ед/л	ДА

Разведение 1 +: 0

Тип образца:

Сыворотка  Плазма  Моча

СМЖ  Другие

Дата коррекции

Гран.норм	Мин	Макс	В работе
			ДА

Коррекция фактора: 1

Коррекция смещ.: 0, Ед/л, Далее >>

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

\* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC ЩФ1

Образцы Данные Реактивы Меню

Фон: Нет

Избыток антиг.: Нет

Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив	Инкубация	Образец	Инкубация	Кинетика	
Реактив: ALPD	Время (сек.): 120	Объем (мкл): 2	Время (сек.): 60	Длина волны (нм): 405	Тип кривой: Линейный отрезок
Объем (мкл): 100				Дополн. длина: 700	Пределы нелин.:
Диспенсир. с: Экстра		Диспенсир. с: Экстра		Ост. абс-ция:	Абс-ция (мА/мин): *
Объем (мкл): 20		Объем (мкл): 8			
Моющий раствор: [Нет]		Разбавл-е с: Вода			Время (сек.): 180
		Моющий раствор: [Нет]			Точки и интервалы: ***

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

\*\*\*-зависит от модели анализатора

# Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab (монореагент)

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC ЩФ1

Образцы    Данные    Реактивы    Меню

Тип калибровки	Линейный	Фактор		Смещение																												
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ																											
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)																												
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)																												
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество																												
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный																												
Калибраторы		<table border="1"><thead><tr><th>Стандарт</th><th>Конц.</th><th>коэф. разв.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Water</td><td>0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TruCalU</td><td>**</td><td>0.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Стандарт	Конц.	коэф. разв.	Water	0	0.0	TruCalU	**	0.0																			Код смещения std	
Стандарт	Конц.	коэф. разв.																														
Water	0	0.0																														
TruCalU	**	0.0																														
Концентрация																																
Козф. разв. 1 +																																

F1    F2 Сохранить    F3 Отменить    F4 Выбор теста    F5 Тесты    F6 Калибр. КК    F7 Стандарты КК    F8 --далее--

\*\* -вводится из паспорта к калибратору

**ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !