

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows the 'Микроальб' (Microalbumin) test configuration window. The 'Калибр.' (Calibration) tab is active. On the left, under 'Парам.' (Parameters), there are fields for 'Прав.' (Method) set to 'Logit-Log-5P', 'Чувствител.' (Sensitivity), 'Повторы' (Repeats) set to 2, 'Интервал(дн)' (Interval in days), 'Предел разл.' (Resolution limit), 'SD', 'Холост. ответ' (Blank response), 'Предел ошибки' (Error limit), and 'Определение коэф.' (Coefficient determination) set to 0. On the right, the 'Калибраторы' (Calibrators) table lists NaCl, TcAl-1 through TcAl-5. NaCl has a concentration of 0.0, while the others are marked with '**'. Below the table are fields for 'Назв.' (Name) and 'Конц.' (Concentration), a checkbox for 'Разв. кал' (Dilution calibration), and a 'Подробнее' (More details) button. At the bottom, there are buttons for 'Доб.' (Add), 'Удалить' (Delete), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Назв.	Конц.
☒ NaCl	0.0
☒ TcAl-1	**
☒ TcAl-2	**
☒ TcAl-3	**
☒ TcAl-4	**
☒ TcAl-5	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр. кач.» соответственно.