

## Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

**Определение теста**

**Thermo SCIENTIFIC** КФК-МБ

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста: **Фотометрический**

Тест в работе: **ДА**

Полное имя: **Креатинкиназа-МБ**

Сетевое имя: \*

Границы: **Ед/л**

Кол-во знаков: **1**

Подтверждение: **Автомат.**

Разведение 1 +: **0**

Тип образца:  
☒ Сыворотка ☒ Плазма ☐ Моча  
☐ СМЖ ☐ Другие

Дата коррекции

Предельный тест: Мин **0** Макс **6000** Ед/л

Начальн. абс: **0** **3.000** А

Предельный разв-я: \* **2000** Ед/л

Вторич раз-е 1 +: **0.0** **2**

| Гран.норм | Мин | Макс | Ед.  | В работе |
|-----------|-----|------|------|----------|
| Жен       | 0   | 24   | Ед/л | ДА       |
| Муж       | 0   | 24   | Ед/л | ДА       |

| Гран.норм | Мин | Макс | В работе |
|-----------|-----|------|----------|
|           |     |      | ДА       |

Коррекция фактора: **1**

Коррекция смещ.: **0** Ед/л **Далее >>**

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

\* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений, указанный для КФК-МБ в норме составляет 6-25% от общей активности фермента.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

**Дозировка**

**Thermo SCIENTIFIC** КФК-МБ

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон: **Нет**

Избыток антиг.: **НЕТ**

Кювета обычная

Дозируемый объем

| Реактив                                               | Образец                                                  | Инкубация                | Реактив                                               | Инкубация                | Кинетика                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Реактив: <b>СКМБД_1</b><br>Объем (мкл): <b>100</b>    | Объем (мкл): <b>5</b>                                    | Время (сек.): <b>180</b> | Реактив: <b>СКМБД_2</b><br>Объем (мкл): <b>25</b>     | Время (сек.): <b>120</b> | Длина волны (нм): <b>340</b><br>Дополн. длина: <b>405</b><br>Ост.абс-ция: <b>*</b>      |
| Диспенсир. с: <b>Экстра</b><br>Объем (мкл): <b>20</b> | Диспенсир. с: <b>Экстра</b><br>Объем (мкл): <b>8</b>     |                          | Диспенсир. с: <b>Экстра</b><br>Объем (мкл): <b>10</b> |                          | Тип кривой: <b>Линейный от</b><br>Пределы нелин.: <b>*</b>                              |
| Моющий раствор: <b>[Нет]</b>                          | Разбавл-е с: <b>Вода</b><br>Моющий раствор: <b>[Нет]</b> |                          | Моющий раствор: <b>[Нет]</b>                          |                          | Абс-ция (мА/мин): <b>*</b><br>Время (сек.): <b>240</b><br>Точки и интервалы: <b>***</b> |

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

\*\*\*-зависит от модели анализатора

# Креатинкиназа МБ

IFCC, DGKCopt., Immuno-inhibition mAK (с иммуноингибированием)



Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC КФК-МБ

Образцы Данные Реактивы Меню

|                    |            |                     |       |                                     |                  |
|--------------------|------------|---------------------|-------|-------------------------------------|------------------|
| Тип калибровки     | Линейный   | Фактор              |       | Смещение                            |                  |
| Повтор через (д)   | 0          | Абс. ошибка (мА)    | *     | Использ. корр.                      | НЕТ              |
| Точки/Калибр.      | Двойная    | Относит. ошибка (%) | *     | Коррекция смещ. время повт. (дд:чч) |                  |
| Подтверждение      | Ручной     | Предел абс-ции (мА) |       | Предел смещения (мА)                |                  |
| Направление кривой | Нарастание | Мин                 | *     | Общее количество                    |                  |
| Тип калибр.        | Одиночный  | Макс                | *     | Увеличенный                         |                  |
| Калибраторы        |            | Стандарт            | Конц. | коэф. разв.                         | Код смещения std |
| Концентрация       |            | Water               |       | 0.0                                 |                  |
| Коэф. разв. 1 +    |            | TcCK-MB             | **    |                                     |                  |

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

**\*\***-вводится из паспорта к калибратору

**ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.