

Pediatric Control

Контрольная сыворотка специфических белков в моче

Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азида натрия.

Упаковка

1 × 1 мл Кат. №: MPP/CON-001
Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °С. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции контрольной сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °С.

Не замораживать!

Установленные значения

Белок	Лот	Срок годности	Номинальное значение, мг/дл*	Допустимый диапазон, мг/дл
α2-Макроглобулин	AL04071	2022-08	11.0	9.3 - 12.6
Трансферрин			14.5	12.3 - 16.7
IgA			11.2	9.5 - 12.9
IgG			53.3	45.3 - 61.3
IgM			7.1	6.0 - 8.2
Лёгкая каппа-цепь**			12.8	10.9 - 14.7
Лёгкая ламбда-цепь**			6.7	5.7 - 7.7

* Значения по Референсному Препарату для белков человеческой сыворотки RPPHS ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Siemens.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)