

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Трансф		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	Трансф	R1	250						
№	*	R2	50						
Полн.назв	Трансферрин	Объем проб	2						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реак							
Перв.крив	570	Диап.линейн.	3	800					
Втор.крив		Предел линейн.							
Направл.	Увеличен	Предел субстр.							
Вр.реакц	-1	Коэфф.							
Вр.инкуб.	16	☐ Проверка прозоны							
Единица	mg/dL	q1		q2		q3		q4	
Точн.	Целое	ПК		Пог					
Доб. Удалить OK Отмена									

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Трансф		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок				
1	Муж	Сыворот		200	360				
2	Жен	Сыворот		200	360				
Пол		Проба		Возраст		Низкий		Высок	
Доб. Удалить OK Отмена									
Доб. Удалить OK Отмена									

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест Профиль Вычислен. Внесистемные Перенос

Трансф

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствитель -

Повторы 2

Интервал(дн) -

Предел разл. -

SD -

Холост. ответ - -

Предел ошибки -

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
☒ NaCl	0.0
☒ TcPr-1	**
☒ TcPr-2	**
☒ TcPr-3	**
☒ TcPr-4	**
☒ TcPr-5	**

Назв -

Конц. -

☐ Разв.кал

Выбор правила калибровки

** -вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.