

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос		
ОбщБел1		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.		
		Тест	ОбщБел1		R1	160				
		№	*		R2	0				
		Полн.назв	Общий белок		Объем проб	3.2				
		№ станд.			R1 холост					
		Тип реакц	Кон.точ		Смеш.хол.реаг					
		Перв.крив	546		Диап.линейн.	0.5		150.0		
		Втор.крив	700		Предел линейн.					
		Направл.	Увеличен		Предел субстр.					
		Вр.реакц	-1		Козэф.					
Вр.инкуб.			☐ Проверка прозоны							
Единица	g/L		q1		q2		q3		q4	
Точн.	0.1		ПК			Пог				
Доб. Удалить ОК Отмена										

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос		
ОбщБел1	Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
	№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
	1	Муж	Сыворот		66.0	88.0
	2	Жен	Сыворот		66.0	88.0
Пол		Проба	Возраст		Низкий	Высок
			-			
Доб.		Удалить	OK		Отмена	

Доб.	Удалить	OK	Отмена
-------------	----------------	-----------	---------------

Общий белок

Biuret without sample blank (биуретовый метод без сывороточного бланка)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E (монореагент)

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ОбщБел1

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствительн.

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
☒ Вода	0.0
☒ TruCalU	**

Назв

Конц.

☐ Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.