

## **BMG Control High**

Контрольная сыворотка бета2-микроглобулина (высокий уровень) **Lot AL03827**

---

### **Назначение**

Точная контрольная сыворотка для определения  $\beta$ 2-микроглобулина (BMG) в сыворотке и моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

### **Состав**

Контрольная сыворотка представляет собой очищенный  $\beta$ 2-микроглобулин, разведённый нормальной человеческой сывороткой.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

### **Упаковка**

1 × 1 мл Кат. №: BMG/CON-001

Готова к использованию.

### **Условия хранения и срок годности**

Хранить при +2 – +8°C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при +2 – +8°C.

Не замораживать!

<b>№ Лота</b>	<b>Годеи до:</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Допустимый диапазон</b>
<b>AL03827</b>	<b>2022-04</b>	<b>3,26 мг/л</b>	<b>2,61 – 3,91 мг/л</b>

### **Изготовитель**

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,  
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)