



# Общий белок

Biuret with sample blank (биуретовый метод с сывороточным бланком)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

The screenshot shows a software window titled 'ОбщБел2' with several tabs: 'Тест', 'Профиль', 'Вычислен.', 'Внесистемные', and 'Перенос'. The 'Калибр.' tab is active, showing calibration parameters. The 'Калибраторы' section contains a table with two entries: 'Вода' with a concentration of 0.0 and 'TruCalU' with a concentration marked with red asterisks (\*\*).

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.