

Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

Кальций (монореагент)

A25 - [Программирование Тестов]
Настройка Программа Рабочая сессия Текущее состояние Архив Утилиты ВЫХОД Помощь

Тесты: **Общие** | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тест идентификации:

Название: Тип Пробы: SER

Режим анализа: Единицы:

Турбидиметрический тест

Тип реакции:

Возрастающая Кол-во повторов:

Убывающая Десятичные знаки:

Установленные Реагенты:

Реагент 1:

Реагент 2:

Test Name in the Report:

Удалить Тип

Сохранить

A25 - [Программирование Тестов]
Настройка Программа Рабочая сессия Текущее состояние Архив Утилиты ВЫХОД Помощь

Тесты: **Общие** | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

 SER

Считывание:

Монохроматика Фильтры: Основной:

Бихроматика Референснй:

Объемы:

Проба: uL

Реактив 1: uL

Реактив 2: uL

Промывание: mL

Время:

[s] Циклы

Чтение 1:

Чтение 2:

Реактив 2:

Фак-р Предразв.: /

Фак-р Постразв.:


Уменьшенный: /

Увеличенный: /

Автоматический повтор

Сохранить

Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

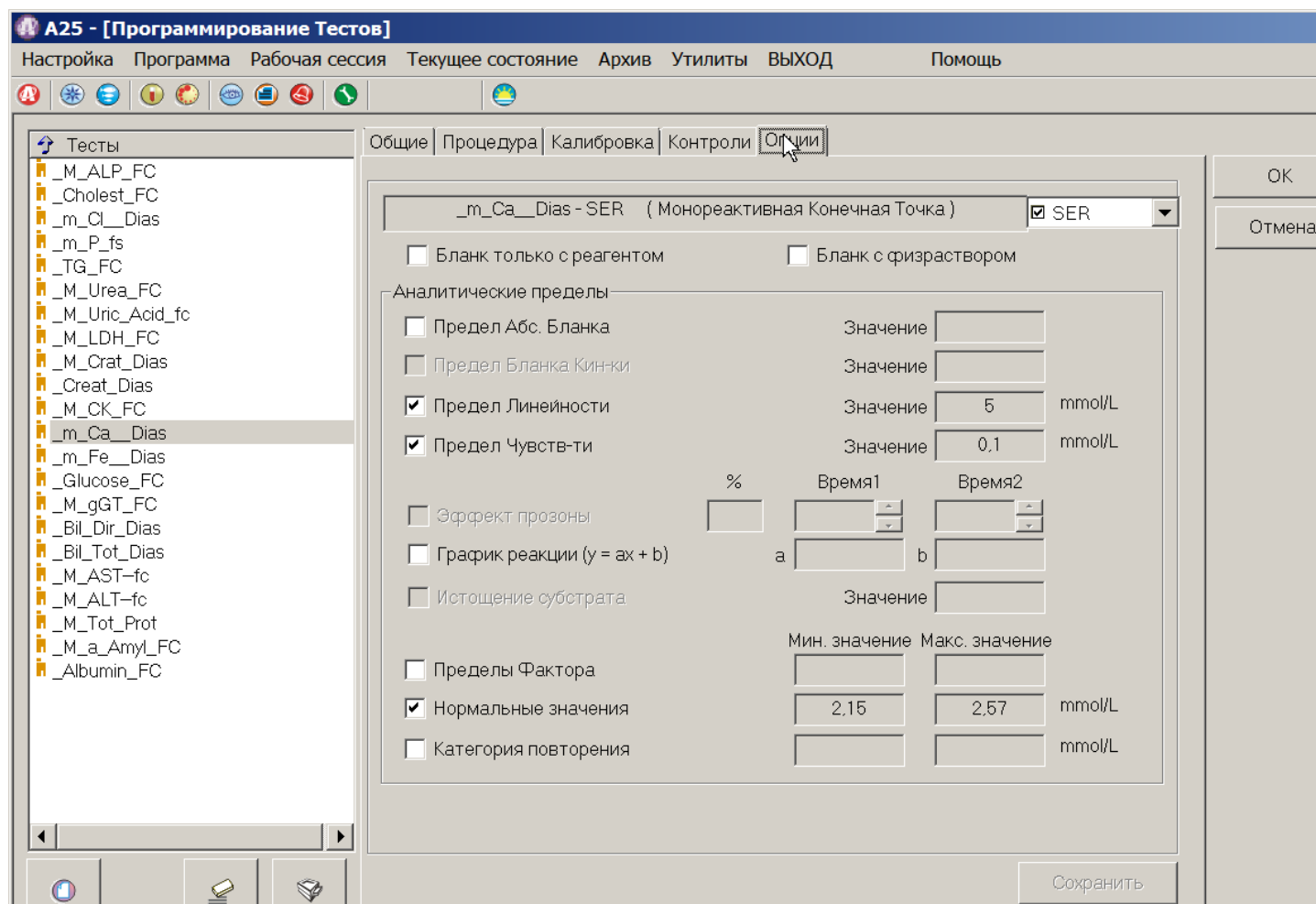

Тест разработан для определения концентрации ионов кальция от 0.1 до 5 ммоль/л (0.4-20 мг/дл).