

# ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-6400 ДДС АВТО

Параметры метода   Параметры калибровки   Границы параметров

Десят.знак:

2

Единицы изм.:

ммоль/л

☐ Бланк пробы

Тип метода

2 Point End

Время теста:

9

Точка:

13

29

0

0

Осн.волна /доп.волна:

570

700

Фактор( $Y = aX + b$ ):

a

1

b

0

Кювета:

Inner & Outer Circle

Пробы

|                 | Sample Volume<br>for Analysis | Sample Volume<br>for Dilution           | Diluent<br>Volume |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Норма:          | 1.6                           | 0                                       | 0                 |
| Снижение:       | 1.5                           | 30                                      | 60                |
| Увеличение:     | 3                             | 0                                       | 0                 |
| ОП предел       | 3.3                           | Позитивная реакция                      |                   |
| Предел Прозоны: | -3.3                          | Нижний предел                           |                   |
| Разбавитель:    | Вода                          | <input type="checkbox"/> Всегда разбав. |                   |

Реагенты

|                             | Reagent Volume | Diluent<br>Volume |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| R1:                         | 160            | 0                 |
| R2:                         | 40             | 0                 |
| Shelf life after open (day) | 0              |                   |

# ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-6400 ДДС АВТО

Параметры метода   Параметры калибровки   Границы параметров

Тип калибровки:

2 Point Linear

Точка:

2

Наклон:

2

Standard Solution

|      | Конц. | Позиция | Sample Volume<br>for Analysis | Sample Volume<br>for Dilution | Diluent<br>Volume |
|------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| (1)  | 0     | 0       | 1.6                           | 0                             | 0                 |
| (2)  | 1     | 0       | 1.6                           | 0                             | 0                 |
| (3)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (4)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (5)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (6)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (7)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (8)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (9)  | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |
| (10) | 0     | 0       | 0                             | 0                             | 0                 |

Проверка калибровки

Проверка отклонения: 3.3

Проверка дискретности: 3.3 Abs.

Проверка чувствитель: 0

Проверка уровня бланка: -3.3 - 3.3

Рекомендованная калибровка

Через: 0 Час

# ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-6400 ДДС АВТО

Параметры метода   Параметры калибровки   Границы параметров

Sample Type List

Serum

Urine

Plasma

CSF

Gastric Juice

Ascites

Other

| starting value | end value | Unit | low value (male) | high value (male) | low value (female) | high value (female) |
|----------------|-----------|------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 0              | 100       | Year | 0.9              | 4.7               | 1                  | 4.7                 |

Default Reference 0.9 - 4.7

Добавить

Изменить

Удалить

Линейность:

0 - 4.7

Нижн. граница:

Верх. граница:

Тип калибровки: линейная (калибратор из набора или TruCal HDL/LDL). Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.