

URIT-8280 ДДС АВТО

Статус: Свободн.
Статус LIS: Не в сети

Анализ Данные Запрос КК Реагенты Сист. Пар. Обслуж. Логи

▶ ⏸ ⏹ ? ⏻

Настройка позиции	Капировка	Хим. параметры	Внешний результат	Расчетный метод	Профиль	ИСМ
51 IgA 54 IgE 52 IgG 53 IgM 6 LDL 39 LDL 43 Lactat 8 Lipase 69 Lp(a) 25 Mg 46 MxAlb 56 Myo 32 NEFA 34 P 77 PCT 44 PhLip 57 PreAlb 58 RF 33 TG 30 TP1 29 TP2 61 Transf 26 UA 28 UIBC 27 Urea 9 aAmy 12 aHBDH 10 pAmy 31 TPur 23 CreaJ 48 ApoA1 49 ApoB 22 Ca_ph 73 K_ 74 Na_ 35 Cl_tc	Общий	Реагент, Образец	Диапазон норм			

Метод UA
№ метода 26

Название UA
Длина волны 1 505

Имя при печати Мочевая кислота
Длина волны 2 700

☒ Использовать

Метод обнаружения KT
Установка бланка

Направление реакции Положительный
Приоритет PRI_19
Ед. изм мкмоль/л
Разряды 0

☐ Предел абсорбции
Abs бланка R1 0.00 - 0.00

☒ Автоматический повторный тест
☐ Повтор. тестирование образца
☒ Разв. при перезапуске
Линейный диапазон 18.0000 - 2500.0000
Коефф. разв. 4

Изменить коэффициент (Y = aX + b)
a= 1.00 b= 0.00

☐ Очистить после теста
☐ S 20.0 uL (5 - 50)
☐ Очистить перед тестом
☐ R1 400.0 uL (50 - 500)
☐ R2 400.0 uL (50 - 500)

Методология 64. Колориметрия
Abs бланка смеси 0.00 - 0.00

Добавить Изменить Удалить Импорт Экспорт Печать Предварительный просмотр

!

Суперадмин: Server
25.12.2023 15:33:06

Мочевая кислота

ТВНВА (метод с уриказой)

URIT-8280 ДДС АВТО

Статус: Свободн.
Статус LIS: Не в сети

Анализ Данные Запрос КК

Реагенты Сист. Пар. Обслуж. Логи

▶ || ■ ? ⏻

Настройка позиции	Калибровка	Хим. параметры	Внешний результат	Расчетный метод	Профиль	ИСМ
	Общий	Реагент, Образец	Диапазон норм			
51	IgA	Объем(мкл)	Время инкубации(s)			
54	IgE	R1 100.0	190			
52	IgG	R2 25.0	224			
53	IgM	R3 0.0	0			
6	LDH	R4 0.0	0			
39	LDL	Объем(мкл)	Точка измерения (время проверки = Точка измерения * тестовый цикл * 2)			
43	Lactat	S 2.0	3	☐ Автомат. пред-разведение 0 ☐ ТвинТест		
8	Lipase					
69	Lp(a)					
25	Mg					
46	MkAlb					
56	Myo					
32	NEFA					
34	P					
77	PCT					
44	PhLip					
57	PreAlb					
58	RF					
33	TG					
30	TP1					
29	TP2					
61	Transf					
26	UA					
28	UIBC					
27	Urea					
9	aAmy					
12	aHBDH					
10	pAmy					
31	TPur					
23	CreaJ					
48	ApoA1					
49	ApoB					
22	Ca_ph					
73	K_					
74	Na_					
35	Cl_tc					

Добавить Изменить Удалить Импорт Экспорт Печать Предварительный просмотр

! - Суперадмин: Server 25.12.2023 15:33:10

URIT-8280 ДДС АВТО

Статус:Свободн.
Статус LIS:Не в сети

АнализДанныеЗапросККРеагентыСист.Пар.Обслуж.Логи

Плеер

ВопросВыход

Настройка позицииКалибровкаХим. параметрыВнешний результатРасчетный методПрофильИСМ

ОбщийРеагент. Образец

Диапазон норм

Тип образца	Пол	Норма L	Норма H
Сыворотка	Мужской	208	428
Сыворотка	Женский	155	357
Сыворотка	Ребенок	0	100
Сыворотка	Мальчик	0	100
Сыворотка	Девочка	0	100
Моча	Мужской	0	100
Моча	Женский	0	100
Моча	Ребенок	0	100
Моча	Мальчик	0	100
Моча	Девочка	0	100

Тип образцаСывороткаПолМужской

Норма L208Норма H428

Применить

ДобавитьИзменитьУдалитьИмпорт ЭкспортПечатьПредварительный просмотр

!

Суперадмин:Server
25.12.2023 15:33:13

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U или стандарт из набора). Контроль по TruLab N и TruLab P.
Для выполнения проб мочи, при заказе, в поле «Тип Пробы» выберите «Другое» Контроль по TruLab Urine уровень1 и уровень 2.