

Аполипопротеин В

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.


Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.80	1.55
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0.75	1.50
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: [] Вер: []

Buttons: Сохр., Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

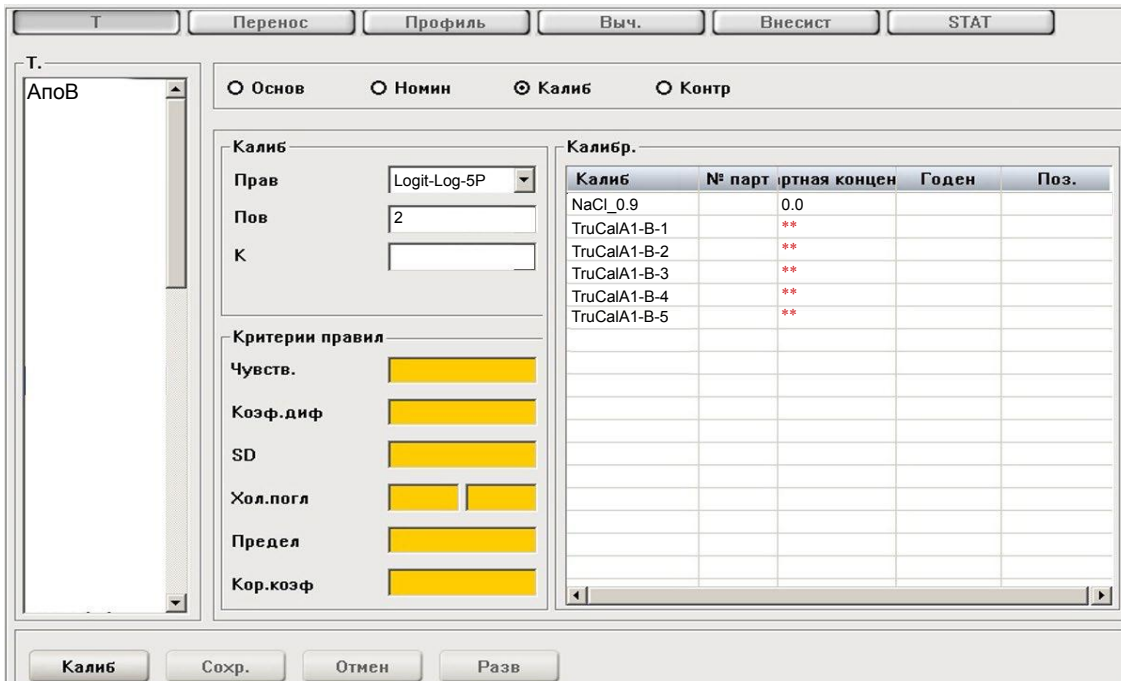

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalA1-B-1		**		
TruCalA1-B-2		**		
TruCalA1-B-3		**		
TruCalA1-B-4		**		
TruCalA1-B-5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Логит-Лог-5P или Сплайн, 6 точек.

Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.