

Параметры для ввода в программу анализатора: Торус 1210; VitaLine 200.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

Stormoff®

ПАРАМЕТРЫ

Параметры теста
Профили
Последовательность проведения тестов
Вычисляемые тесты
Внешние тесты
Рефлекс тесты

Тест
Код теста
Полное название
Тест
Код теста

Основных параметров
Нормальные величины
Калибровка

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
Alb	
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TrUr	22

Метод
Сэмпл бланк

Основной фильтр
Длинительный фи
Ед. изм.
Кол. зн. посл. зпт

Объем R1 (мкл)
МЕСТО R1
Время инкубации (с)
Факт

Объем R2 (мкл)
МЕСТО R2
Время инкубации (с)
Факт

Объем образц. (мкл)
Время считыв. (с)
Рост вращ. микс

Произв. реаг.
Diasys
Лизирующий р.

Информация о реагенте R1
Информация о реагенте R2

Номер лота
Номер лота

Штрихкод R1
Штрихкод R2

Срок годности
Срок годности

Эксп. срок годности
Эксп. срок годности

Добавить
Удалить
Сохранить
Печать
Печать
Импорт
Экспорт

[illegible]

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРАКТА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

ПАРАМЕТРЫ

Параметры теста

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
ALT	17
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TrpUr	22

Полное название

Фосфор

Тест

P

Код теста


##

Основные параметры

Количество стандартов: **2**

Тип калибровки: По двум точкам

Позиция стандарт	Концентрация стандарта	Оптическая плотность
1	39 *	0.013
2	40 *	0.364
3		
4		
5		
6		

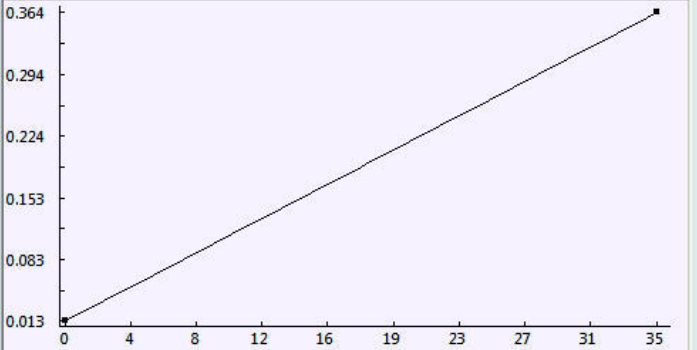

Тип пробирки

cup

№ лота калибр.

25881 *

Срок годности

2021-07-10 *

Ист.калибр.

Номер лота

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать предв.просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

- * Выбирается пользователем.
- ** -Вводится из паспорта к калибратору
- *** -Рассчитывается анализатором

Тип калибровки: линейная, калибратор TruCal U или стандарт из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Тел.: (495) 980-63-39

e-mail: sale@diakonlab.ru

сайт: www.diakonlab.ru