

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные
№		Анализ	P	Тип	Конеч.точка
Единицы	mmol/l	Точность	2	Перв.крив	340
Об. пробы.	3	Об. R1.	260	Об. R2.	65
Время инк.	15	Антиген	<input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ	
Время р	-1 16	Субстрат	0	Н.предел	0
R1 холост		Смеш. хол.реаг.		В.предел	0
Н.предел	0	Н.предел	0	Линейность	
В.предел	0	В.предел	0	Н.предел	0,065
				В.предел	9,69
				Полн.назв.	Фосфор
				№ печати	*

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные																																																																						
Анализ	P	← →	Проба	Сыворотка	Пол																																																																						
				Муж.																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Возраст</th> <th colspan="2">Нормальн. диапазон</th> </tr> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Верх.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,84</td> <td>1,45</td> </tr> </tbody> </table>						Возраст				Нормальн. диапазон		№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Верх.предел	<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,84	1,45
Возраст				Нормальн. диапазон																																																																							
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Верх.предел																																																																				
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,84	1,45																																																																				

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Нормин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные																																																																	
Анализ	P									Проба	Сыворотка																																																																
										Пол	Жен.																																																																
<div> <div>Возраст</div> <div>Нормальн. диапазон</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Вер.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> 1</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 5</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td colspan="4"></td> <td>0,84</td> <td>1,45</td> </tr> </tbody> </table>												№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел	<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,84	1,45
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел																																																																				
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0																																																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,84	1,45																																																																				

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	3			<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	0							
Чувствительность	0							
Определение коэффициента	0							
Предел ошиб. для повт. обраб. 0 Холостой ответ 0 0 Предел различий 0 SD 0								

******-вводится из паспорта к калибратору

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.