

Мочевая кислота

ТВНВА (метод с уриказой)

Furuno CA400 ДДС АВТО

Монитор(F5)	Хим. Парам(F6)	Калибр. (F7)	КК (F8)	Система (F9)	Обслуж.(F10)	EL	ВЫКЛЮЧ.
-------------	----------------	--------------	---------	--------------	--------------	----	---------

Хим. параметры

Метод Имя

Имя печати

Образец

Ед. изм.

Тип исслед.

Точки измерения
1 —
☒ Вкл. 2 —

Длина волны
Перв. Втор. ☐ Выкл.

Норм.
☐ Развед.
☐ Развед.
☐ Развед.
☐ Копир.

Имя реагента Реагент(мкл) Вода(мкл)

R1

R2 ☒ Вкл.

Разбав. ☐ Вкл.

Зн. посл. зап.

Норм. Диап.

№	Имя диап.	Мин.	Макс.
1	Муж-G1	208	428
2	Муж-G2	208	428
3	Муж-G3	208	428
4	Жен-G1	155	357

Тех. диапазон (Конц.) —
(mAbs./10) —
Имя реагента

SPT пром. ☐ Вкл.

Скор. смеш. R1 R2

Метод
Метод2
SI
Вычисл.
Проф.
Заказ
Промыв.

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U или стандарт из набора). Контроль по TruLab N и TruLab P.