

Натрий

ДДС

Параметры теста 1		Параметры теста 2	
Общие положения Наименование: <input type="text" value="Na"/> Предразведение: <input type="text" value="Нет"/>		Измерение Бланк Наклона: <input type="text" value="Нет"/> Инкубация, изм-ие: <input type="text" value="61"/> <input type="text" value="114"/> сек <div> <div>меньшее</div> <div>большее</div> </div>	
Проба Бланк Пробы: <input type="text" value="Нет"/> <div> <div>объем пробы:</div> <div>при перезапуске:</div> </div> <div> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> </div>		Предел линей-ти: <input type="text" value="50,0"/> %	
Реактивы Бланк Реагента: <input type="text" value="Нет"/> <div> <div>объем пробы:</div> <div>при перезапуске:</div> </div> <div> <input type="text" value="180"/> <input type="text" value="180"/> </div>		Пределы абсорбции Абсорбция: <input type="text" value="-0,100"/> - <input type="text" value="3,000"/> Абс Абсорбция R: <input type="text" value="-0,100"/> - <input type="text" value="3,000"/> Абс Истощение субстрата <input type="text" value="0,100"/> Абс	
Добавление реактива через -2,25 минут (R1) <div> <input type="text" value="180"/> <input type="text" value="180"/> </div>			
Добавление реактива через 2,90 минут (R2) <div> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> </div>			
Добавление реактива через 4,70 минут (R3) <div> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="60"/> </div>			

Количество калибраторов 2, повторов 2.

Контроль по TruLab N и P