

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-800 ДДС АВТО

Биохимические методы	Профили методов	Рассчетные методы	Перекрестная контаминация	Форма отчета	Настройки ИСБ	Другие установки	Методы вводимые вручную	Настройки соединения с ЛИС
Параметры анализа	Параметры калибровки	Диапазоны нормальных значений						

Биохим. Метод:	HDL	Полное название:	ЛПВП	Знаки посл запят:	2	Единица изм.:	ммоль/л	☐ Бланк пробы
Метод расчета:	2 point end	Время теста:	10	Точки изм.:	14 34 0 0	Интервал КК:	0	
Основн. волна:	570	Дополн. волна:	700	Фактор анализатора (aX+b):	a = 1 b = 0	☐ Всегда разбавлять		

Объем образца

Сыворотка

-

Норма:	2.8	0	0	2.8	0	0
Снижение:	2	0	0	0	0	0
Увеличение:	6	0	0	0	0	0
Предел О.П.:	3.3			3.3	Positive Reaction	
Пред. прозоны:	-3.3			-3.3	Lower Limit	

Объемы реагентов:

	Реагент	Разбавитель	Позиция
R1:	280	0	0
R2:	0	0	0
R3:	70	0	0
R4:	0	0	0

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-800 ДДС АВТО

Биохимические методы	Профили методов	Расчетные методы	Перекрестная контаминация	Форма отчета	Настройки ИСБ	Другие установки	Методы вводимые вручную	Настройки соединения с ЛИС
Параметры анализа	Параметры калибровки	Диапазоны нормальных значений						

Метод:

Тип калибровки: Точек: Наклон:

Проверка дискретности: О.П.

Проверка чувствительности:

Проверка бланка:

Стандарты

	Концентрация	Уровень	Время	Точность	Повторяемость
(1)	0	S1	2.8	0	0
(2)	1.44	S3	2.8	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Автокалибровка

	Задержка
По бланку:	0 Час
Промежуточная:	0 Час
По 2 точкам:	0 Час
Многоточечная:	0 Час

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-800 ДДС АВТО

Биохимические методы	Профили методов	Расчетные методы	Перекрестная контаминация	Форма отчета	Настройки ИСБ	Другие установки	Методы вводимые вручную	Настройки соединения с ЛИС
Параметры анализа	Параметры калибровки	Диапазоны нормальных значений						

Метод: HDL

Для сыворотки:

☒ По возрасту:

Возраст	Мужчины	Женщины
0 - 35 Год	0.9 - 4.7	1 - 4.7
35 - 50 Год	0.9 - 4.7	1 - 4.7
50 - 200 Годы	0.9 - 4.7	1 - 4.7

☐ Для всех:

0.9 - 4.7

Границы линейн-ти: 0 - 4.7

Для других типов проб:

☐ По возрасту:

Возраст	Мужчины	Женщины
0 - 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 - 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 - 200 Год	0 - 0	0 - 0

☒ Для всех:

0 - 0

Границы линейн-ти: -99999 - 99999

Тип калибровки: линейная (калибратор из набора или TruCal HDL/LDL). Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.