

Магний (DiaSys)

Xylidil blue (метод с ксилидиновым синим)



Параметры для ввода в программу анализатора Urit 8031; VitaRay - 300; BioLit-8020; Eos Bravo 200

* - Вводятся из паспорта к калибратору!

Промывка игл

Промывка кювет

AD

Тесты

Работа

Срочные

Журнал

Обзор

Температура

Помощь

Смена пользователя

Выход

Список тестов

Имя
50 CRE
51 CO2
52 PHOS_DD
53 P
54 Mg_D
55 Mg
56 Cr
57 IgM
58 IgG
59 IgA
60 mALB
61 CRP_D
62 HbA1C_D
63 CRP
64 C3

Код
Тест

Метод
Установка дозирования, инкубации и измерения
Нормальный диапазон
Установка

	Норма Н	Норма В
Бланк	-3.0000	3.0000
Мужчины	0.73	1.06
Женщины	0.77	1.03
Дети	0.60	0.95

Линейность до

☐ Abs warning

☐ Superlinear auto retest

☒ Образец
 ☐ Разведение

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCal U) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.