

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Dirui CS-6400 ДДС АВТО

Параметры метода				Параметры калибровки		Границы параметров	
Десят.знак:		1	Единицы изм.:		Ед/л	☐ Бланк пробы	
Тип метода		Rate A	Время теста:		9	Точка: 20 28 0 0	
Осн.волна /доп.волна:		405	546	Фактор(Y = aX + b):		a	b
						1	0
Кювета:		Inner & Outer Circle					

Пробы				Реагенты		
	Sample Volume for Analysis	Sample Volume for Dilution	Diluent Volume		Reagent Volume	Diluent Volume
Норма:	3.6	0	0			
Снижение:	3.5	10	90	R1:	120	0
Увеличение:	7.2	0	0	R2:	30	0
ОП предел	2.6	Позитивная реакция		Shelf life after open (day)		
Предел Прозоны:	-3.3	Нижний предел		0		
Разбавитель:	Вода	☐ Всегда разбав.				

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Dirui CS-6400 ДДС АВТО

Параметры метода

Параметры калибровки

Границы параметров

Тип калибровки:

2 Point Linear

 Точка:

2

 Наклон:

2

Standard Solution

	Конц.	Позиция	Sample Volume for Analysis	Sample Volume for Dilution	Diluent Volume
(1)	0	0	3.6	0	0
(2)	180	0	3.6	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0
(7)	0	0	0	0	0
(8)	0	0	0	0	0
(9)	0	0	0	0	0
(10)	0	0	0	0	0

Проверка калибровки

Проверка отклонения:

3.3

Проверка дискретности:

3.3

 Abs.

Проверка чувствитель:

0

Проверка уровня бланка:

-3.3

 -

3.3

Рекомендованная калибровка

Через:

0

 Час

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U) или по фактору. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Для выполнения проб мочи, при заказе, в поле «Тип Пробы» выберите «Другое» Контроль по TruLab Urine уровень1 и уровень 2.