



Латекс-тесты

для идентификации микроорганизмов

Экспресс-тест для подтверждения принадлежности выделенной культуры к роду/виду исследуемых микроорганизмов методом латексной агглютинации

Принцип работы тестов

- Отберите отдельную колонию
- Сделайте мазок на тестовом поле
- Добавьте 1 каплю латексного реагента
- Наблюдайте появление агглютинации в тестовом поле в течение 2 мин в случае положительного результата и отсутствие агглютинации в случае отрицательного результата

Код	Наименование	Фасовка
F46	Тест латексной агглютинации <i>Campylobacter</i>	50 тестов
F48	Тест латексной агглютинации <i>Listeria</i>	50 тестов
M41	Тест латексной агглютинации <i>C. difficile</i>	50 тестов
M42	Тест латексной агглютинации <i>Salmonella</i>	50 тестов
M43	Тест латексной агглютинации <i>Staph. aureus</i>	100 тестов
M44	Тест латексной агглютинации <i>E. coli</i> O157	50 тестов
M45	Тест латексной агглютинации <i>Legionella</i>	50 тестов
M47	Тест латексной агглютинации <i>Strep</i> (группы A, B, C, D, F, G)	50 тестов



Тест-системы Microgen ID

для биохимической идентификации бактерий

Пластиковые стрипы с лунками содержат лиофилизированный биохимический субстрат с цветовым индикатором.

После внесения в лунки бактериальной суспензии и инкубации 18-24 ч. при 35-37°C необходимо считать результаты.

По изменению цвета в каждой лунке подсчитывается количество положительных реакций и составляется цифровой код, который вводится в программу.

Код	Наименование	Фасовка	Дополнительные реагенты
MID-64	Тест-система для идентификации Гр- палочек (энтеробактерий и др.) GN-ID A	60 тестов	MID-61f Реагент Ковача на индол MID-61e Реагент TDA, MID-61c Реагент VP I MID-61d Реагент VP II, Минеральное масло
MID-65	Тест-система для идентификации Гр- оксидазоположительных палочек (Pseudomonas и др.) GN-ID B	24 теста	MID-61a Нитрат А реагент, MID-61b Нитрат В реагент
MID-67	Тест-система для идентификации листерий Listeria-ID	20 тестов	—
MID-66	Тест-система для идентификации бацилл и родственных видов Bacillus-ID	20 тестов	MID-61f Реагент Ковача на индол, MID-61a Нитрат А реагент MID-61b Нитрат В реагент, MID-61c Реагент VP I MID-61d Реагент VP II, Минеральное масло
MID-62	Тест-система для идентификации патогенных стрептококков и энтерококков Strep-ID	20 тестов	MID-61k Реагент PYR, MID-61l Реагент Нингидрин MID-61c Реагент VP I, MID-61d Реагент VP II Минеральное масло
MID-69	Тест-система для идентификации стафилококков Staph-ID	20 тестов	MID-61a Нитрат А реагент, MID-61b Нитрат В реагент MID-61k Реагент PYR, Минеральное масло