

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Dirui CS-400 ДДС АВТО

Биохим. Параметры	Позиция Профиля	Расчетный/компенсационный пункт	Перекрест. Контаминация	Формат Отчета	ИСБ Установки	Другие Установки	Ручной ввод позиции	Настройки соединения с ЛИС
Параметры Анализа	Параметры Калибровки	Границы Параметров						

Позиция Теста:	aAmy	Полное Имя Теста:	α-Амилаза	Знаки после запятой:	0	Единица:	Ед/л
Метод:	Rate A	Время Теста:	15	Точка:	24 34 0 0	☐ Бланк Образца	
Основ. Фильтр:	405	Дополн. Фильтр:	546	Фактор Анализатора (Y=aX+b)	a = 1 b = 0	☐ всегда разбавлять	

Объем Образца	Serum						Other					
	Нормальный:	6	0	0	6	0	0					
	Снижение:	5	10	90	5	10	90					
	Увеличение:	12	0	0	12	0	0					
	ОП. Предел:	2.2				2.2				Positive Reaction		
Предел Прозоны:	-3.3				-3.3				Lower Limit			

Реагент	Объем	Развести Объем	Поз.	
	R1:	200	0	0
	R2:	0	0	0
	R3:	50	0	0
	R4:	0	0	0

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Dirui CS-400 ДДС АВТО

Биохим. Параметры	Позиция Профиля	Расчетный/компенсационный пункт	Перекрест. Контаминация	Формат Отчета	ИСБ Установки	Другие Установки	Ручной ввод позиции	Настройки соединения с ЛИС
Параметры Анализа	Параметры Калибровки	Границы Параметров						

Позиция Теста:

Методы Калибровки: Точка: Наклон:

Проверка Дискретности: ОП.

Проверка Чувствительности:

Горизонтальная Проверка Бланка: -

СТД

(1)	0	S1	6	0	0
(2)	168	S2	6	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Автокалибровка

	Задержка
Бланк калибровки:	0 Час
Промежуток калибровки:	0 Час
Калибровка по 2 точкам:	0 Час
Калибровка многоточеч.:	0 Час

α-Амилаза

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогентазида (EPS-G7))

Dirui CS-400 ДДС АВТО

Биохим. Параметры	Позиция Профиля	Расчетный/компенсационный пункт	Перекрест. Контаминация	Формат Отчета	ИСБ Установки	Другие Установки	Ручной ввод позиции	Настройки соединения с ЛИС
Параметры Анализа	Параметры Калибровки	Границы Параметров						

Позиция Теста: aAmy

Serum

☐ Спец. Значение:

Возраст	-Муж-	-Жен-
0 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 200 Год	0 - 0	0 - 0

☒ Значение по умолч.:

-

Границы Линейности: -

Other

☐ Спец. Значение:

Сыворотка	-Муж-	-Жен-
0 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 0 Год	0 - 0	0 - 0
0 200 Год	0 - 0	0 - 0

☒ Значение по умолч.:

-

Границы Линейности: -

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U) или по фактору. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Для выполнения проб мочи, при заказе, в поле «Тип Пробы» выберите «Другое» Контроль по TruLab Urine уровень1 и уровень 2.