

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Холес				
<div> <div> <div>Параметры</div> <div>Номинал</div> <div>Калибр.</div> <div>Контр.кач.</div> </div> </div>				
Тест	Холес		R1	280
№	*		R2	0
Полн.назв	Холестерин		Объем проб	3
№ станд.			R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ		Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	510		Диап.линейн.	0.08 - 19.40
Втор.крив	670		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен		Предел субстр.	
Вр.реакц	0 - 38		Коефф.	
Вр.инкуб.			<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	mmol/L		q1	q2 q3 q4
Точн.	0.01		ПК	Пог
<div> <div>Доб.</div> <div>Удалить</div> <div>ОК</div> <div>Отмена</div> </div>				

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).  
Контроль по TruLab N и TruLab P.

# Холестерин

GHOD-PAP (холестериноксидазный метод)

Тест Профиль Вычислен. Внесистемные Перенос

Холес

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствительн.

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв

Конц.

☐ Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов  
вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.