


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

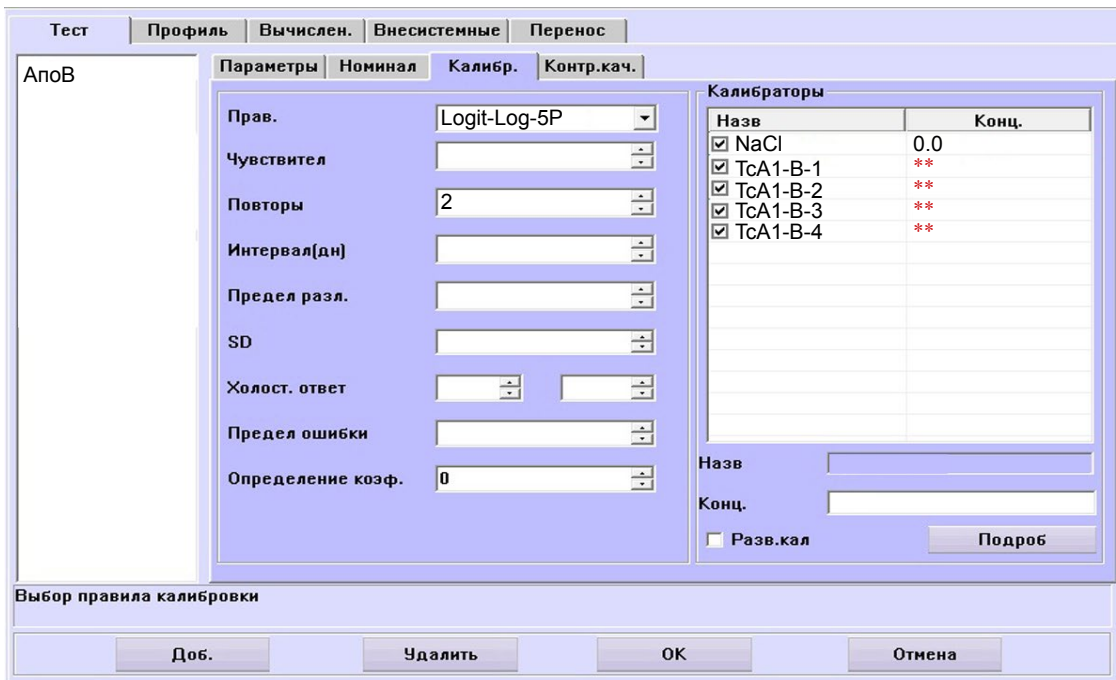

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

АпоВ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-4	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.