

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

IFCC, without P5P (метод без пиридоксальфосфата)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC АЛТ

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста:

Тест в работе:

Полное имя:

Сетевое имя:

Границы:

Кол-во знаков:

Подтверждение:

Разведение 1 +

Тип образца: ☒ Сыворотка ☒ Плазма ☐ Моча ☐ СМЖ ☐ Другие

Дата коррекции:

Предель тест: Мин Макс Ед/л

Начальн. абс: А

Предель раз-я: Ед/л

Вторич раз-е 1 +

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	0	31	Ед/л	ДА
Муж	0	41	Ед/л	ДА

Гран.норм	Мин	Макс	В работе
			ДА

Коррекция фактора:

Коррекция смещ.: Ед/л

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC АЛТ

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон:

Избыток антиг.:

Кювета обычная

Дозируемый объем:

Реактив	Образец	Инкубация	Реактив	Инкубация	Кинетика
Реактив: ALTD_1 Объем (мкл): 100	Объем (мкл): 10	Время (сек.): 180	Реактив: ALTD_2 Объем (мкл): 25	Время (сек.): 60	Длина волны (нм): 340 Дополн. длина: 405 Ост.абс-ция: 0.6
Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 20	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 10		Тип кривой: Линейный от Пределы нелин.: * Абс-ция (мА/мин): *
Моющий раствор: Нет	Разбавл-е с: Вода Моющий раствор: Нет		Моющий раствор: Нет		Время (сек.): 180 Точки и интервалы: ***

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

***-зависит от модели анализатора

IFCC, without P5P (метод без пиридоксальфосфата)



Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Thermo SCIENTIFIC

Параметры калибровки

АЛТ

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Линейный	Фактор		Смещение																															
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Используй. корр.	НЕТ																														
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд;чч)																															
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)																															
Направление кривой	Снижение	Мин	*	Общее количество																															
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный																															
Калибраторы		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Стандарт</th> <th>Конц.</th> <th>эф. разв.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Water</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TruCalU</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Стандарт	Конц.	эф. разв.	Water	0	0.0	TruCalU	**	0.0																						Код смещения std	
Стандарт	Конц.	эф. разв.																																	
Water	0	0.0																																	
TruCalU	**	0.0																																	
Концентрация																																			
Коэф. разв. 1 +																																			

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

**** - вводится из паспорта к калибратору**

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !