

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры Позиция Профиля Расчетный/компенсационный пункт Перекрест. Контаминация Формат Отчета ИСБ Установки Другие Установки Ручной ввод позиции Настройки соединения

Параметры Анализа Параметры Калибровки Границы Параметров

Позиция Теста: LDL Полное Имя: ЛПНП Десяти. разря. 2 Единица: ммоль/л
Метод: 2-точ кон. Время Теста: 10 Точка: 16 48 0 0 ☐ Бланк Образца
Основ. Фильтр: 570 Дополн. Фильтр: 700 Фактор Анализатора($Y=aX+b$) a = 1 b = 0

Объем Образца

	Сыворотка			Другие		
Нормальный:	2.9	0	0	2.9	0	0
Снижение:	1.5	0	0	1.5	0	0
Увеличение:	6	0	0	6	0	0
ОП. Предел:	3.3			3.3		
Предел Прозоны:	-3.3			-3.3		

Тип дилуента: Вода ☐ Всегда разбавлять

Реагент

	Объем	Разбавитель	Поз.
R1:	240	0	0
R2:	60	0	0

Время открытой бутылке (/ д) 0

Сохранить

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры Позиция Профиля Расчетный/компенсационный пункт Перекрест. Контаминация Формат Отчета ИСБ Установки Другие Установки Ручной ввод позиции Настройки соединения

Параметры Анализа Параметры Калибровки Границы Параметров

Позиция Теста: LDL

☐ Проверить диапазон коэф. К

Методы Калибровки: 2-точ линейность Точка: 2 Наклон: 2

Проверка Дискретности: 3.3 ОП.

Проверка Чувствительности: 0

Горизонтальная Проверка Бланка: -3.3 - 3.3

СТД

(1)	0	S1	2.9	0	0
(2)	1	S2	2.9	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Автокалибровка

	Задержка
Пустая калибровка:	0 Час
Диап. калибровка	0 Час
2-точ калибровка	0 Час
Многоточечная калибровка	0 Час

Сохранить

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры	Позиция Профиля	Расчетный/компенсационный пункт	Перекрест. Контаминация	Формат Отчета	ИСБ Установки	Другие Установки	Ручной ввод позиции	Настройки соединен
Параметры Анализа	Параметры Калибровки	Границы Параметров						

Позиция Теста: LDL ▼

Сыворотка

Ч-ное значен	кон.знач.	Единица	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)
▶								

Зна. по умолч. -

Границы Линейности: -

Значение Паники: -

Другие

Ч-ное значен	кон.знач.	Единица	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)	лзк. знач.(муж)	лзк. знач.(жен)
▶								

Зна. по умолч. -

Границы Линейности: -

Значение Паники: -

Тип калибровки: линейная (калибратор из набора или TruCal HDL/LDL). Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.